



ENOR_{pro}

Notice d'utilisation



Nous vous remercions pour votre achat et espérons que cet équipement sera un précieux allié dans votre pratique.

Cette notice vous guidera pas à pas, de la découverte de votre matériel à son utilisation.

Nous vous invitons à la lire dans son intégralité.


Au fil des pages, **suivez les actions indiquées en orange** pour vous accompagner dans la **première utilisation** de vos équipements.

Merci pour votre confiance 😊



1. Déballage	page 3
2. Barre LED	page 4
3. Vibreurs sans fil	page 6
4. Pilotage par smartphone / tablette	page 8
5. Pilotage par télécommande	page 10
6. Casque audio	page 12
7. Trépied	page 13
8. Mise à jour des équipements	page 14
9. Dépannage	page 14
10. Précautions importantes	page 15

1. DEBALLAGE

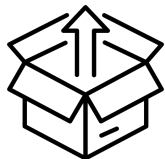

Selon la configuration de votre commande, l'emballage peut contenir les éléments suivants :

- 1 barre LED
- 2 vibreurs sans fil
- 1 télécommande
- 1 câble USB-C et un chargeur secteur
- 1 casque audio Bluetooth
- 1 trépied
- 1 housse de transport
- 1 pochon de rangement des accessoires


Vérifiez que vous disposez bien de tous les éléments spécifiques à votre commande.

2. BARRE LED

1. Présentation

La Barre LED comprend les éléments suivants :

- **Une barre inclinable (A)** : à ajuster délicatement pour orienter les stimulations à l'angle souhaité pendant les balayages. ⚠ Ne jamais déplacer l'équipement en le tenant par cette partie.
- **Une tige verticale (B)** : par laquelle tenir l'équipement pour tout déplacement.
- **Un socle (C)** : il comprend à l'arrière deux connecteurs magnétiques pour les vibreurs (D), un bouton ON/OFF (E) et un connecteur USB-C (F) pour la recharge.

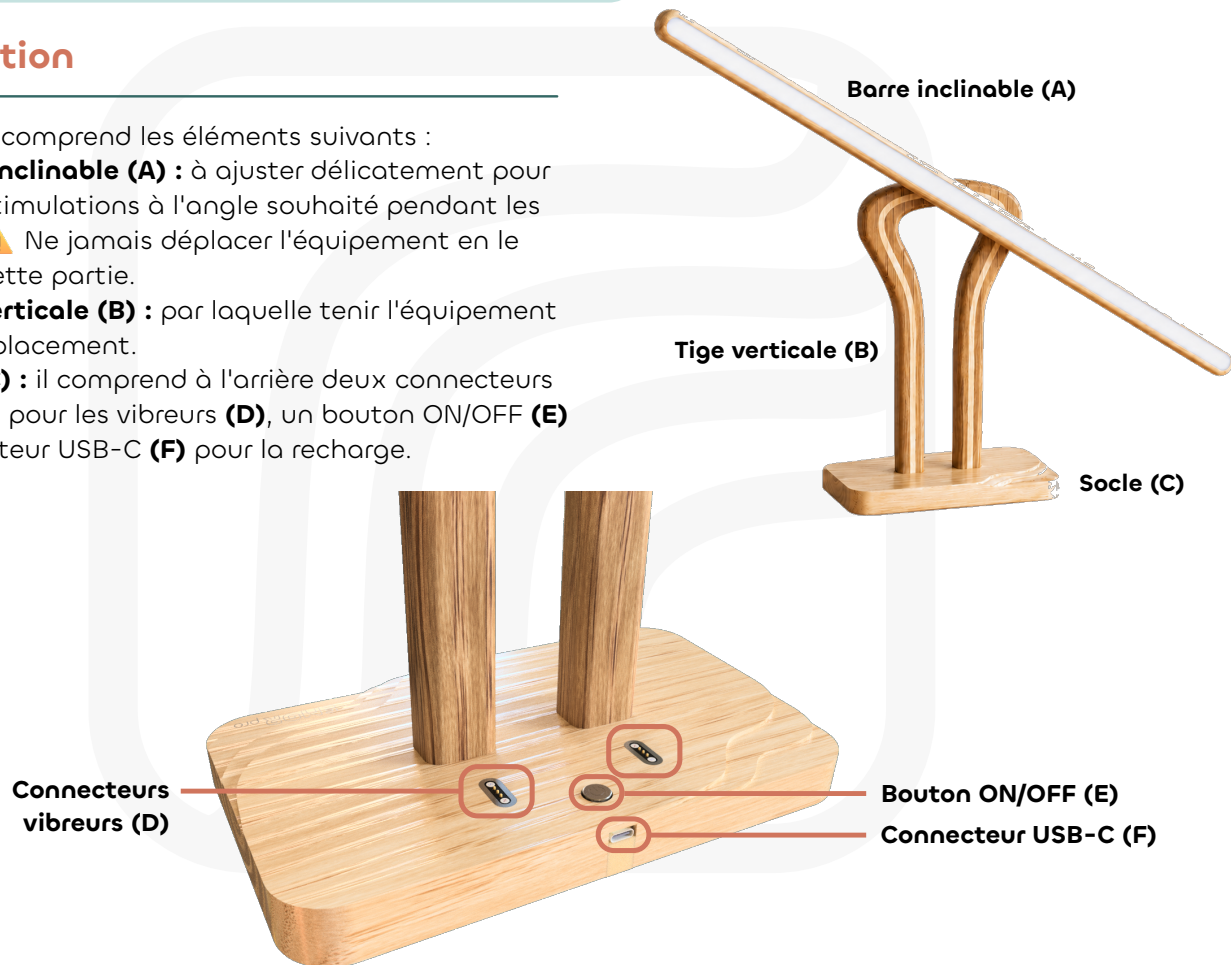

2. Fonctionnement

- **Allumage**

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la barre LED.
- La LED centrale de la barre clignote en vert pour confirmer l'allumage.

- **Recharge de la batterie**

- Branchez le chargeur USB sur le connecteur USB-C du socle.
- La barre LED peut être utilisée durant la recharge.
- Le niveau de charge de la batterie est accessible sur la télécommande ou l'application smartphone / tablette.
- Si le niveau de la batterie est inférieur à 10%, la LED centrale de la barre LED clignotera en rouge entre les balayages.
- Pour préserver la batterie, la barre LED s'éteint après une période d'inactivité.

- **Utilisation de la barre LED**

- La barre LED peut être commandée à l'aide de la télécommande ou de l'application smartphone / tablette. Plusieurs paramètres peuvent être ajustés : la vitesse de balayage, la largeur du point lumineux, la couleur de LED, le type de balayage, etc (détaillés plus tard).
- Le socle de la barre LED sert également de support de recharge pour les vibreurs sans fil grâce aux deux connecteurs magnétiques.



3. VIBREURS SANS FIL

1. Présentation

- **Les vibreurs sans fil comprennent :**


- Une LED permettant une stimulation visuelle lors des cycles SBA. Cette même LED indique également le statut du vibreur et son niveau de charge.
- Un connecteur magnétique qui permet la recharge sur le socle de la barre LED.
- Une lettre indique le vibreur droit **D**, ou gauche **G**.

- **Allumage des vibreurs :**

- Les vibreurs s'allument automatiquement par détection de mouvement. Il suffit de les prendre en main pour qu'ils s'allument.
- La LED clignote en bleu pour indiquer l'allumage.

- **Vibreurs droit et gauche :**

Chaque vibreur est prédéfini (droit et gauche) afin de permettre la synchronisation des vibrations avec la lumière de la barre LED. Ils peuvent être placés indifféremment sur les deux **emplacements A ou B** du socle.

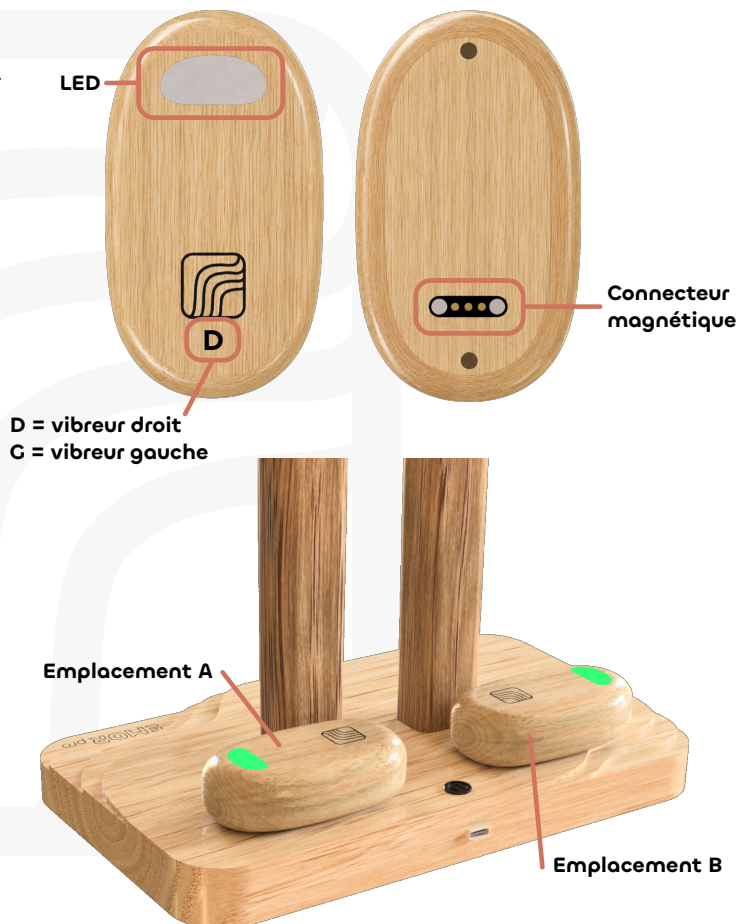

2. Fonctionnement

- **Recharge des vibreurs :**

- **Déposez les vibreurs sans fil sur le socle de la barre LED comme le montre l'image ci-contre.**

- La LED clignote en vert pour confirmer la connexion, puis s'allume pour indiquer le niveau de leur batterie : rouge pour un niveau inférieur à 20%, orange entre 20 et 50%, jaune entre 50 et 80%, et vert supérieur à 80%.

- Lorsqu'ils sont connectés au socle, le niveau de batterie des vibreurs est consultable depuis la télécommande ou l'application smartphone.

- Lorsqu'ils ne sont pas connectés au socle, la LED du vibreur clignotera en rouge périodiquement pour prévenir d'un niveau de charge très bas.

- Les vibreurs sont rechargés par la batterie du socle **même si ce dernier n'est pas branché en USB**. Il n'est donc pas nécessaire de brancher le câble USB pour les recharger.

⚠ Si un vibreur est complètement déchargé au point de ne plus s'allumer, placez-le sur un emplacement de recharge, puis branchez le chargeur USB-C au socle de la barre LED. Patientez ensuite plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il se rallume.



3. Remarques


- Lorsque vous n'utilisez pas les vibreurs, laissez-les à leur emplacement sur le socle.

- Aucune connexion spécifique des vibreurs n'est nécessaire. Une fois la barre LED connectée à la télécommande ou à l'application smartphone/tablette, les vibreurs sont automatiquement connectés.

4. PILOTAGE PAR SMARTPHONE / TABLETTE




1. Téléchargement de l'application

Retrouvez l'application **"EMDR Pro"** dans les stores Android ou iOS, ou bien flashez les QRcodes ci-contre.

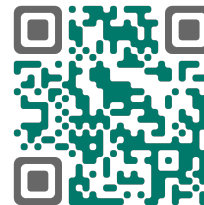


2. Connexion à l'équipement

- Lancez l'application, acceptez les demandes d'autorisations.
- Cliquez sur **"Connecter"** en bas à gauche de l'écran.
- La LED centrale de la barre LED clignote en vert pour confirmer la connexion.

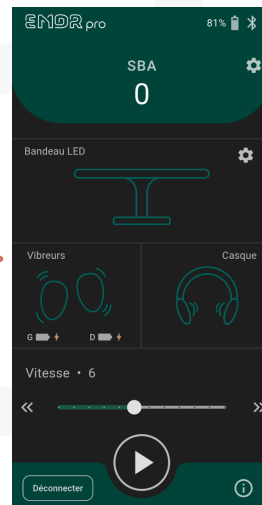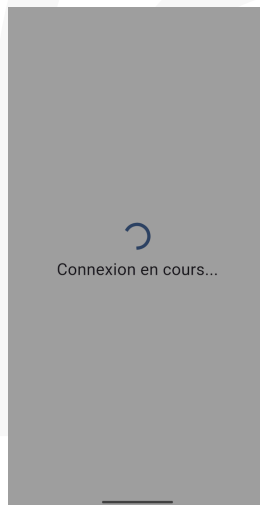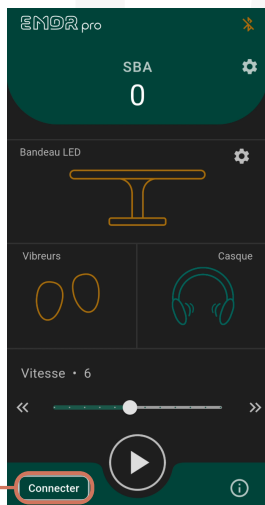

3. Description des fonctions de l'application

A partir de l'application, pilotez les balayages et réglez les différents paramètres :

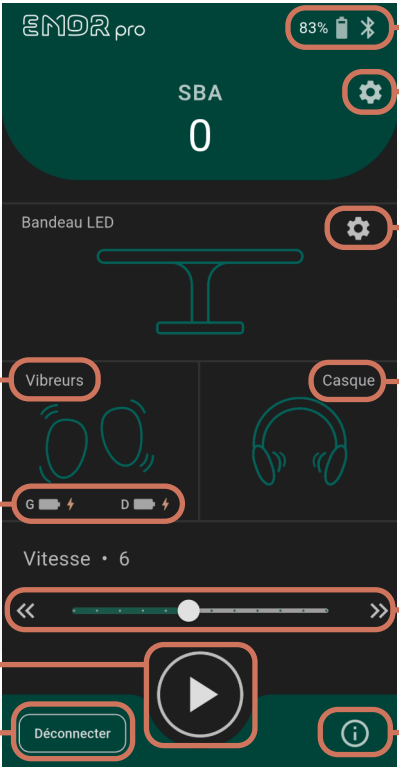

The screenshot shows the ENDR pro application interface. At the top, the status bar displays 83% battery, signal strength, and Bluetooth. The main screen has a dark green header with 'ENDR pro' and 'SBA 0'. Below this is a 'Bandeau LED' section with a diagram of an LED bar and a settings gear icon. The 'Vibreur' section shows two battery icons labeled 'G' and 'D' with settings for state, intensity, color, and vibration type. The 'Casque' section shows a headset icon and settings for state, sound type, and Bluetooth delay. The 'Vitesse' section features a slider set to 6. At the bottom, there is a large play button for starting/stopping scans, a 'Déconnecter' button, and an information icon for help or language settings.

Niveau de batterie de la barre LED

Réglages du compteur :
type de comptage, limiteur, affichage des compteurs

Réglages de la barre LED :
état, couleur, intensité, type de balayage, nombre de LEDs

Réglages des vibreurs :
état, intensité, couleur de LED, type de vibration

Niveau de batterie des vibreurs :
G = gauche, D = droit

Réglages du son :
état, type de son et décalage Bluetooth - **voir page 12**

Réglage de la vitesse de balayage

Démarrer / arrêter les balayages

Déconnecter

Aide / Changer la langue

5. PILOTAGE PAR TELECOMMANDE

1. Fonctionnement

- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour l'allumer.
- Elle se met en recherche de la barre en indiquant **"Recherche équipement"**.
- Si votre équipement est allumé, la télécommande s'y connecte en indiquant **"Connexion en cours"** puis **"Connecté"**.
- Pour éteindre la télécommande, maintenez appuyé le bouton .

La télécommande fonctionne sur batterie, utilisez le chargeur USB fourni pour la recharger. Pour préserver la batterie, la télécommande s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité.

2. Utilisation

- Appuyez sur l'un des cinq **"Boutons Menus"** et naviguez ainsi :



Gauche ou **Droite** pour modifier le paramètre sélectionné



Monter ou **Descendre** dans le menu



Quitter le menu

- **Pilotez les balayages :**



Lancer ou **arrêter** les balayages




Ralentir (gauche) ou **accélérer (droite)**



Augmenter ou **Réduire** la luminosité de la barre LED

**Boutons
Menus**

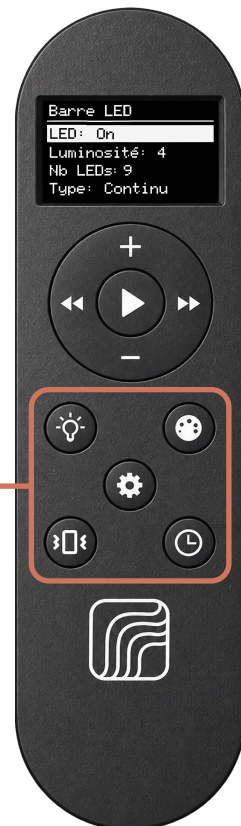

3. Description des Menus



Menu Barre LED :

- LED : active (ON) ou désactive (OFF) les LEDs
- Luminosité : modifie l'intensité lumineuse des LEDs
- Nb LEDs : modifie le nombre de LEDs activées, permet un balayage plus ou moins large
- Type : modifie le type de balayage en Continu ou Alterné



Menu Couleur barre LED :

- Couleur : modifie la couleur des LEDs
- Aléatoire : Active (ON) ou désactive (OFF) le mode couleur aléatoire



Menu Batteries : affiche les niveaux de charge de la barre LED, des vibreurs gauche et droit, ainsi que de la télécommande



Menu Vibreurs :

- Vibration : active (ON) ou désactive (OFF) les vibrations
- Intensité : modifie le niveau d'intensité des vibrations
- Type : vibrations continus (Continu) ou vibrations brèves (Tapping)
- Couleur LED : modifie la couleur de la LED des vibreurs
- LED : active (ON) ou désactive (OFF) la LED des vibreurs
- Lum. LED : modifie l'intensité lumineuse de la LED des vibreurs
- Coul. aléa : active (ON) ou désactive (OFF) la couleur aléatoire de la LED des vibreurs



Menu Compte à rebours :

- Etat : active (ON) ou désactive (OFF) le compte à rebours
- Nb SBA : modifie le nombre de SBA avant l'arrêt du compte à rebours

6. CASQUE AUDIO

- **Allumage :**

- **Maintenez appuyé le bouton ON/OFF (environ 5 secondes) jusqu'à entendre un bip dans le casque, confirmant son allumage.**

- La LED du casque clignote alternativement rouge/bleu signifiant que la recherche Bluetooth est en cours.

- **Connexion :** à partir des paramètres de votre smartphone/tablette, **recherchez le casque Bluetooth BQ-618 dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, puis cliquez sur "Connecter".** Un bip dans le casque confirme la connexion.

- **Volume :** réglez le volume sur le casque avec les boutons +/- ou depuis les boutons "Volume" de votre smartphone/tablette.

- **Réglage du décalage :** tous les casques audios Bluetooth ont un décalage qui retarde les stimulations auditives par rapport aux SBA visuelles et tactiles.

- Pour compenser cela, réglez le **"Décalage audio Bluetooth"** en cliquant sur l'icône **"Casque"** de l'application.

- Lancez des SBA visuelles (ou tactiles) en même temps que les stimulations auditives, puis augmentez le décalage jusqu'à ce que le son soit synchronisé avec les stimulations visuelles et/ou tactiles.

- **Arrêt :** maintenez appuyé le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.

Bouton
ON/OFF



Décalage audio Bluetooth • 200 ms



Avance le son par rapport à la lumière, pour compenser la latence des écouteurs Bluetooth (~150-250 ms typique). Mettre 0 pour des écouteurs filaires.

7. TREPIED

Installation du trépied :

- **Vissez la vis du trépied (A)** dans l'**insert fileté (B)** situé sous le socle de la barre LED.
- **Dévissez la molette (C)** pour faire varier la hauteur du trépied puis revissez délicatement.

Socle barre LED

Insert fileté (B)

Vis trépied (A)

Trépied

Molette (C)

8. MISE A JOUR DES EQUIPEMENTS

Le logiciel de la barre LED et de la télécommande peuvent être mis à jour à distance par Internet.

Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, vous serez informé.e par e-mail.

Les instructions et les fichiers nécessaires à la mise à jour sont disponibles à l'adresse **emdrpro.fr/miseajour**

Les mises à jour permettent d'améliorer les performances de l'appareil, de corriger d'éventuels problèmes ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, n'hésitez pas à nous contacter si vous repérez un dysfonctionnement, si vous souhaitez un ajustement ou un ajout de fonctionnalités.

9. DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement de votre équipement, consultez en premier lieu la page de dépannage disponible à l'adresse **emdrpro.fr/depannage**

Cette page est régulièrement mise à jour et regroupe les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés lors de l'utilisation de l'appareil, ainsi que les éventuelles procédures de vérification ou de résolution.

Si le problème persiste après avoir suivi les recommandations disponibles sur cette page, ou si le dysfonctionnement rencontré n'y est pas décrit, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous accompagner.

10. PRECAUTIONS IMPORTANTES

• **Responsabilité :** Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Il est conçu exclusivement pour remplacer les mouvements alternés manuels et doit être utilisé uniquement par un.e professionnel.le dûment formé.e. EMDR pro décline toute responsabilité quant aux résultats thérapeutiques obtenus lors de son utilisation.

• **Nettoyage :** Les vibreurs peuvent être désinfectés avec une solution hydroalcoolique ; le bois est protégé par un vernis résistant. Tous les autres équipements doivent être nettoyés avec des produits sans alcool.

• **Environnement d'utilisation et de stockage :**

- L'équipement doit être utilisé et conservé dans un environnement sec, en intérieur, à des températures situées entre 10°C et 30°C.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'équipement, veillez à bien l'éteindre.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur ni à la lumière directe du soleil.

• **Batterie :**

- L'appareil contient une batterie rechargeable intégrée. Utilisez exclusivement le chargeur fourni.
- Ne pas démonter, percer ni exposer la batterie au feu ou à l'eau.
- Tenir hors de portée des enfants.

• **Recyclage :** Cet équipement contient des composants électroniques et ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés. Il doit être déposé dans un point de collecte spécifique afin de garantir un recyclage approprié. Dans le doute, veuillez nous contacter à assistance@emdrpro.fr



GARANTIE 2 ANS

La garantie, d'une durée de 2 ans, prend effet à la réception du produit.

En cas de problème technique, contactez-nous afin d'évaluer la panne. La garantie ne couvre pas l'usure esthétique du bois, ni l'altération normale de l'autonomie de la batterie. Pour maximiser la durée de vie de votre batterie, nous recommandons de limiter les décharges en dessous de 10 %.

PERIODE D'ESSAI

La période d'essai, d'une durée de 30 jours, prend effet à la réception du produit.

Pour retourner l'équipement, contactez-nous et nous vous indiquerons la procédure à suivre. L'équipement devra être renvoyé dans son emballage et son état d'origine (frais de retour à votre charge). Le remboursement sera effectué après réception du produit et vérification de son état.

Retrouvez tous les détails dans les Conditions Générales de Vente sur : www.emdrpro.fr/CCV

Cette notice est mise à jour et consultable à l'adresse : www.emdrpro.fr/notice

Pour toute question, contactez-nous par email : assistance@emdrpro.fr

EMDR pro
Roselab, 55 avenue Louis Bréguet
31400 Toulouse
FRANCE
SIRET : 983727876 - TVA : FR59983727876

